

IABP Balloon Catheter
TOKAI 7Fr-Clear



仕様

バルーンサイズ	L 40cc	M 35cc	MS 30cc	S 25cc	SS 20cc
駆動容量					
適応身長	165cmOver	165~155cm	155~145cm	145cmUnder	
バルーン全長	255mm	225mm	195mm	180mm	170mm
バルーン外径	14.5mm			13.5mm	
シャフト外径	7Fr				
適応シース径	7Fr				
適応ガイドワイヤー径	0.025inch				
セントラルルーメン径	0.028inch				
挿入可能長	700mm				
製品番号	ACR40BX	ACR35BX	ACR30BX	ACR25BX	ACR20BX

梱包内容

本体トレイ	バルーンカテーテル本体・一方栓・シリンジ (50cc)
付属品トレイ	0.025inch 145cm アングル型親水性ガイドワイヤー 0.035inch 80cm アングル型親水性ガイドワイヤー 19G 穿刺針・7Fr 20cm シースダイレーター 活栓付圧モニターチューブ (15cm&90cm)
延長チューブ	Datascope 社製駆動機専用延長チューブ ARROW・MERA・XEMEX 系駆動機用延長チューブ (ARROW 用コネクター・MERA 用コネクター同梱) 注意] ARROW・MERA 系駆動機で使用される場合は、同梱のコネクターを接続し、ご使用下さい。



製造販売元・販売元

販売代理店

株式会社 東海メディカルプロダクツ

本社/〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485
 お客様問合せ窓口: TEL.0568-54-7661 FAX.0568-87-0058
 代表: TEL.0568-81-7954 FAX.0568-81-7785
 URL: <http://www.tokaimedpro.co.jp>
 E-mail: info@tokaimedpro.co.jp

IABP Balloon Catheter
TOKAI 7Fr-Clear

バルーンポンピング用カテーテル



TOKAI MEDICAL PRODUCTS

高度管理医療機器 単回使用
 承認番号: 21200BZZ00537000

販売名: 「IABPバルーンカテーテル」
 保険請求分類: 「バルーンポンピング用バルーンカテーテル」
 (Ⅱ)一般用末梢循環温存型
 JMDN分類: 34919000 バルーンポンピング用カテーテル

TOKAI 7Fr-Clear



国産初のIABPバルーンメーカーとして

1989年国産初のIABPバルーンを上市以後、国産メーカーとして皆様のご要望に少しでもお応え出来る様、様々な改良・開発を日々実施しております。

日本人設計

IABPバルーン開発時に東京女子医科大学にて心疾患患者の大動脈を計測し、日本人に特化したバルーン設計を実施。

「全ては日本人の為に」

それが国産メーカーとしての私たちの解答です。

「日本人の体格に適した大動脈内バルーンのサイズの検討」
人工臓器 17(3),960-963(1988)

1 人でも多くの生命を救いたい

私たち東海メディカルプロダクツの創業の精神、そして願い。私たちは全ての人に安心してご使用頂けるよう、**製品ラインナップ**の充実を図っています。

	L 40cc	M 35cc	MS 30cc	S 25cc	SS 20cc
適応身長	165cm以上	165~155cm	155~145cm	145cm以下	
バルーン長	255mm	225mm	195mm	180mm	170mm
バルーン径	14.5mm			13.5mm	


7Frクラス最多 5サイズのラインナップ



7 Frでありながら8Frクラスの基本性能

適応ガイドワイヤー径は0.025inch。
セントラルルーメン径0.028inchにより
8Frクラス同等の**Clear**な圧モニターを実現。
バルーン応答性能も8Frクラス同等。
7Frでありながら8Frクラスの基本性能を備えた
IABPバルーン。それが、**TOKAI 7Fr-Clear**です。

～血管へのやさしさ～

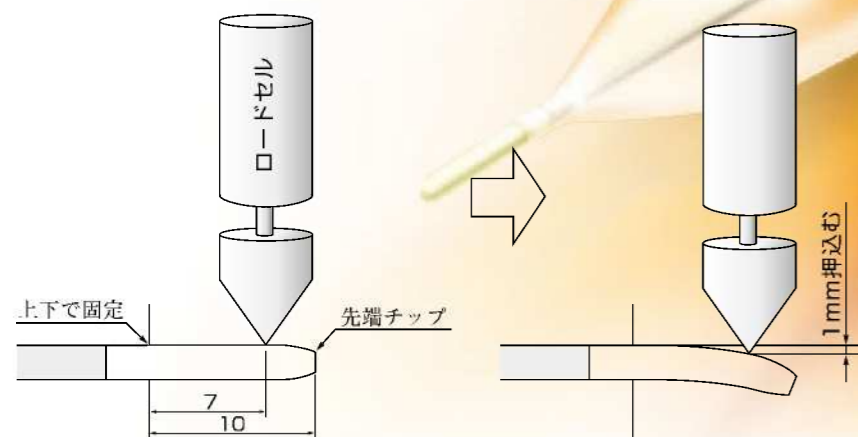

1mm押込んだ際の、ロードセルにかかる荷重

Tokai 7Fr-Clear : 0.9N
他社 7.5Fr : 4.5N

安全第一

上市直後から安全を最優先課題とし、全製品に対して**5万回の駆動試験**を実施し、初期不良率を軽減。また、バルーンの製法・材質を調整する事により、従来品に比べ、**割れないバルーン**を実現。

「効率よりも安全を」

それが私たちのポリシーです。

