

T.M.P. Large Occlusion Balloon Products

Lock Balloon Catheter
TMP ロックバルーンカテーテル

Lock Balloon Catheter
L-5 Type
TMP ロックバルーンカテーテル

Honesty Rp
TMP ロックバルーンカテーテル

T.M.P. Large Occlusion Balloon Products Line Up

製品名	カタログNo.	カテーテル有効長	カテーテル外径	バルーン全長	ノミナルバルーンφ	ノミナル容量	最小適合シースサイズ	適合ガイドワイヤーφ
ロックバルーン	Sサイズ	OCB-03B	35cm	9Fr	5cm	32mm	23cc	14Fr
	Lサイズ	OCB-03A	75cm					
	LLサイズ	OCB-03C	100cm					
ロックバルーン L-5	OCB-05A	72cm	7Fr	3cm	20mm	5cc	12Fr	
オネスティー RP	OCB-08A	100cm	9Fr				14Fr	

注)臨床では透視下で十分にバルーンの拡張状態を確認の上、ご使用ください。

T.M.P. Large Occlusion Balloon Products Compliance Chart

製品名	カタログNo.	バルーンφ	液体注入容量																			
			5cc	10cc	15cc	20cc	23cc	25cc	30cc	35cc	40cc	45cc										
ロックバルーン	Sサイズ	OCB-03B	20mm	27mm	32mm	35mm	-	38mm	40mm	41mm	N/A	N/A										
	Lサイズ	OCB-03A											N/A	N/A	N/A	N/A	32mm	33mm	34mm	37mm	40mm	42mm
	LLサイズ	OCB-03C																				
ロックバルーン	L-5	OCB-05A																				
オネスティー	RP	OCB-08A																				

標準バルーン拡張径(ノミナル)

注)臨床では透視下で十分にバルーンの拡張状態(※特に20mm以下の血管径)を確認の上、ご使用ください。

- 医療機器製造販売承認番号：21000BZZ00722000
- 販売名：TMPロックバルーンカテーテル
- JMDN分類：中心循環系閉塞術用血管内カテーテル
- 特定保険医療材料請求分類
血管内手術用カテーテル/オクルージョンカテーテル ② 特殊型
- 高度管理医療機器 クラスⅣ 単回使用

製造販売元

**株式会社
東海メディカルプロダクツ**

本社/ 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町更屋敷1485

お客様問い合わせ窓口

TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058

代表

TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

T.M.P. Large Occlusion Balloon Products

Lock Balloon Catheter



Honesty Rp

Lock Balloon Catheter
L-5 Type

T.M.P. Large Occlusion Balloon Products

独自のバルーンテクノロジーと
ノウハウを凝集した大血管閉塞用バルーンです。

TMPラージオクルージョンバルーンの基本特性

迅速なバルーンのイン/デフレーションタイムを実現


- 広いバルーン拡張用ルーメンを確保したため、短い時間でバルーンの拡張・収縮が可能です。

独自のバルーン素材によって得られる耐久性が、手技ニーズを網羅

- 当社の四半世紀にわたる、IABPバルーンで培った独自のポリウレタン材質を使用しているため、バルーン拡張時における、高いアブレーションレジスタンス(バルーンの摩擦耐性)が期待できます。

Lock Balloon Catheter

TMP ロックバルーンカテーテル
オクリュージョンバルーンカテーテル

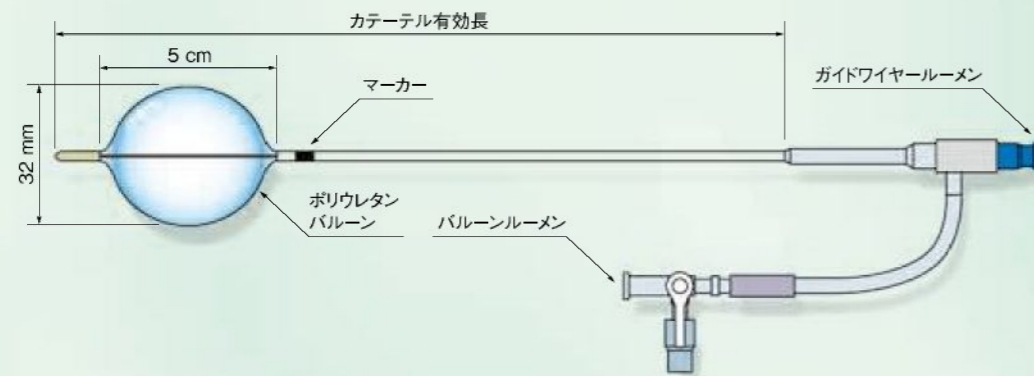


製品仕様	バルーン全長	5cm
	最適拡張径	32mm (液体23cc注入時)
	カテーテルシャフト外径	9Fr
	カテーテル有効長	35cm・75cm・100cm
	適合ガイドワイヤー	0.035inch

Lock Balloon Catheter L-5 Type

TMP ロックバルーンカテーテル


製品仕様	バルーン全長	3cm
	最適拡張径	20mm (液体5cc注入時)
	カテーテルシャフト外径	7Fr
	カテーテル有効長	72cm
	適合ガイドワイヤー	0.035inch

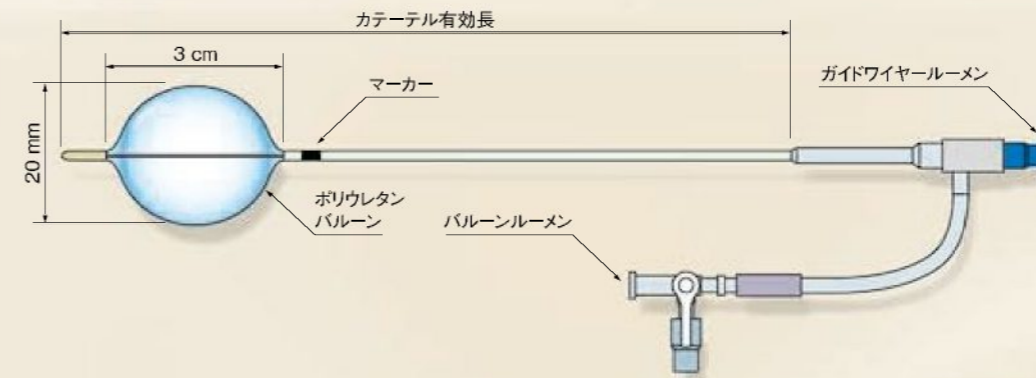

Lock Balloon Catheter L-5 Type & Honesty Rp

TMP ロックバルーンカテーテル

注入量	5cc	10cc	15cc	20cc
バルーン拡張状態	バルーン拡張状態	バルーン拡張状態	バルーン拡張状態	バルーン拡張状態
バルーン拡張状態				

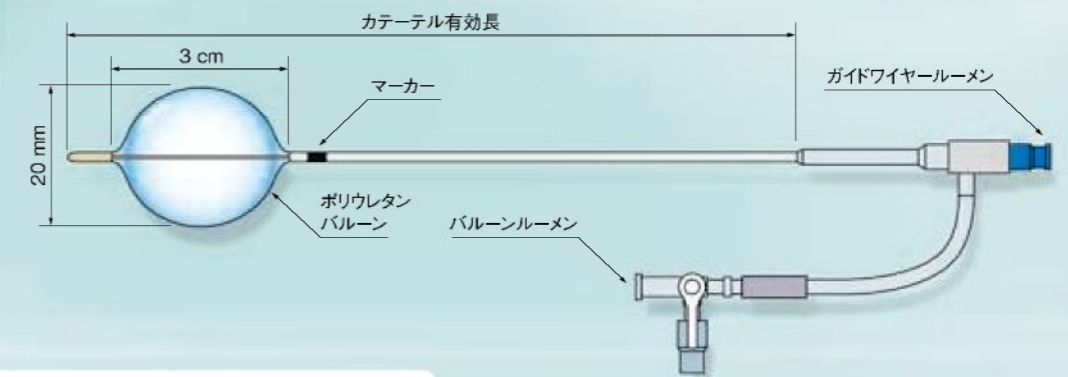

製品仕様	バルーン全長	3cm
	最適拡張径	20mm (液体5cc注入時)
	カテーテルシャフト外径	9Fr
	カテーテル有効長	100cm
	適合ガイドワイヤー	0.035inch

Honesty Rp
TMP ロックバルーンカテーテル